



Una forma nueva de inmovilizar material de intubación


Clip-FAB: Premio del jurado a uno de los mejores inventos presentados en la 44ª edición de la Feria Internacional de Inventos de Ginebra(Suiza) en el 2016: Trofeo (Copa), medalla de oro y diploma con mención especial del jurado



CLIP-FAB (Fijador Adaptable con Balón intraoral)

Dispositivo desechable, sencillo, seguro y de fácil manejo, que inmediatamente después de intubar a un paciente o víctima, se introduce en la cavidad oral, y tras insuflar su balón o neumo (de baja presión y con forma en herradura), se encaja el T.O.T.(Tubo oro-traqueal) en la pinza o clip del dispositivo, consiguiendo así su total fijación

Se trata de una sola pieza donde se diferencian claramente tres partes

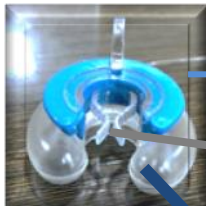

Extremo proximal. Se sitúa por delante de las arcadas y posterior a los labios

Cuerpo. Se sitúa entre la arcada superior e inferior y en su interior se aloja un clip o pinza, la cual fija el material de intubación sin colapsarlo

Extremo distal. Neumo o balón que al ser insuflado, a través de su válvula, se adapta en la parte posterior de las arcadas o encías fijando el dispositivo a la boca

Una forma nueva de inmovilizar material de intubación

Clip-FAB: Premio del jurado a uno de los mejores inventos presentados en la 44ª edición de la Feria Internacional de Inventos de Ginebra(Suiza) en el 2016: Trofeo (Copa), medalla de oro y diploma con mención especial del jurado



Los objetivos principales que se quieren conseguir con el Clip-Fab son:

- 1º. Evitar la progresión, regresión y lateralización del material de intubación aplicado a pacientes o víctimas independientemente de la postura a la que se les tiene que someter para su tratamiento (decúbito supino, prono, lateral, fowler...)
- 2º. Vencer el desafío que, supone la fijación del T.E en el paciente neonato donde se utilizan los T.E. sin neumo
- 3º. Vencer el desafío que, supone la fijación del T.E en pacientes con quemaduras o abrasiones extensas en cuello y cara. O en caso de intervenciones como la de cirugía plástica y reparadora de la cara
- 4º. Prevenir y evitar úlceras por presión en labios y mucosas producidas por el T.E y por la cánula de guedel (que actualmente se utiliza en intubaciones prolongadas)
- 5º. Prevenir y evitar rozaduras, abrasiones y heridas en la cara por utilizar los fijadores externos actuales (vendas, esparadrapo, tiras de velcro...)
- 6º. Evitar que el paciente intubado muerda el T.E (para evitar esto, actualmente se utiliza la cánula de Güell.)
- 7º. Facilitar la higiene bucal en pacientes de intubación prolongada (UCI, REA...)
- 8º. Dignificar el aspecto del paciente intubado (Quirófano, UCI, REA, SAMU,...)



Una forma nueva de inmovilizar material de intubación


Clip-FAB: Premio del jurado a uno de los mejores inventos presentados en la 44ª edición de la Feria Internacional de Inventos de Ginebra (Suiza) en el 2016: Trofeo (Copa), medalla de oro y diploma con mención especial del jurado




CLIP-FAB (Fijador Adaptable con Balón Intraoral)

Instrucciones de uso

Colocación del Clip-Fab

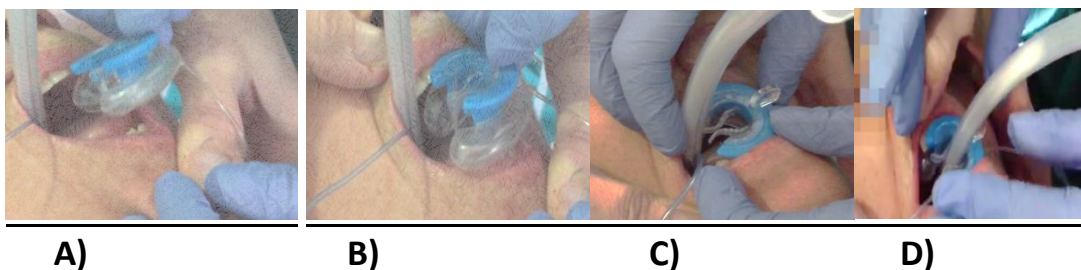

Clip-fab Colocado

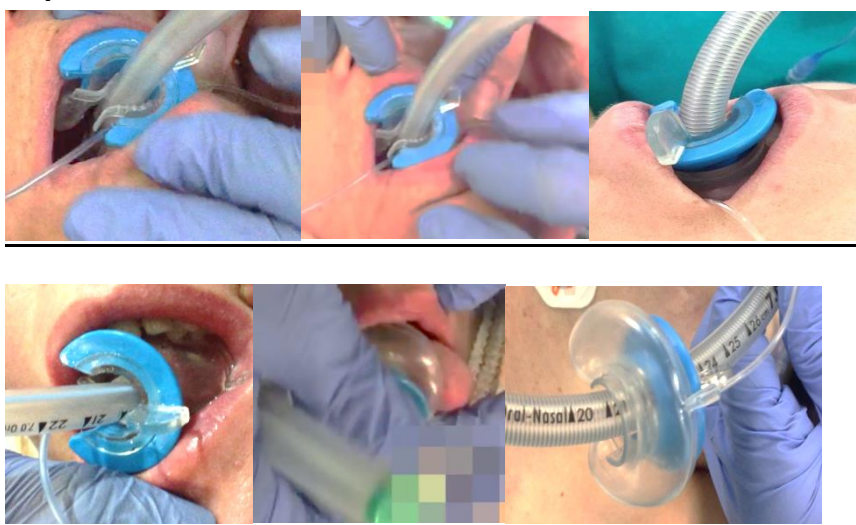

Extracción del Clip-Fab durante la extubación.




Una forma nueva de inmovilizar material de intubación

Clip-FAB: Premio del jurado a uno de los mejores inventos presentados en la 44ª edición de la Feria Internacional de Inventos de Ginebra(Suiza) en el 2016: Trofeo (Copa), medalla de oro y diploma con mención especial del jurado

Se le ha presentado el dispositivo a 100 profesionales (Anestesiistas e Intensivistas) de los siguientes hospitales de Alicante:

- Hospitales Vithas: Hospital Perpetuo Socorro y hospital Medimar(Alicante)
- Clínica Vistahermosa (Alicante)
- Hospital IMED de Torrellano (Elche)
- Hospital General de Alicante
- Hospital de San Juan (Alicante)

De las 100 encuestas repartidas a los distintos especialistas (Anestesiistas e Intensivistas) presentándoles el Clip-FAB. El resultado que hemos obtenido es el siguiente:

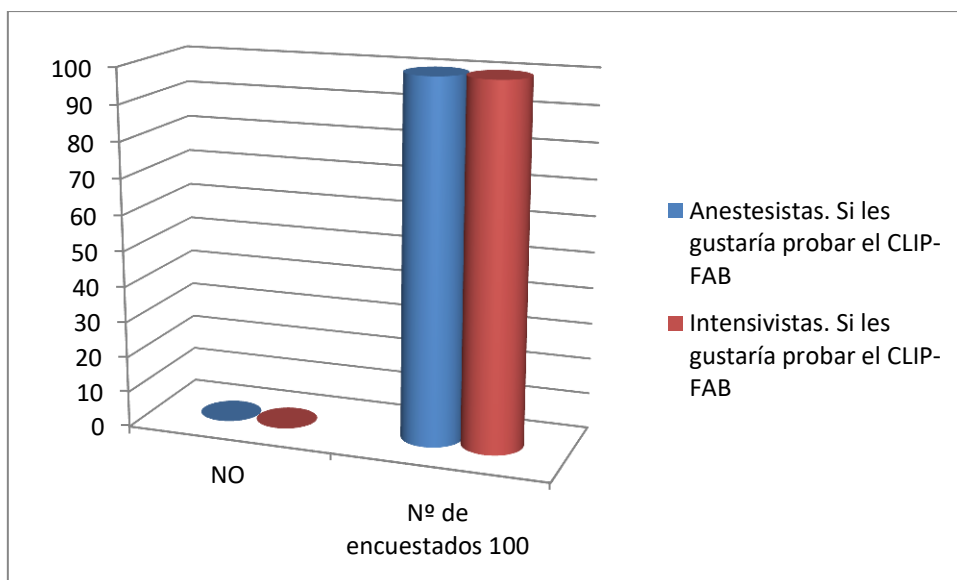



Una forma nueva de inmovilizar material de intubación

Clip-FAB: Premio del jurado a uno de los mejores inventos presentados en la 44ª edición de la Feria Internacional de Inventos de Ginebra(Suiza) en el 2016: Trofeo (Copa), medalla de oro y diploma con mención especial del jurado

Anestesiastas que han utilizado el fijador Clip-FAB

Anestesiastas que han utilizado el Clip-FAB	Intervenciones realizadas utilizando el Clip-FAB como fijador del T.O.T	Posición del paciente durante la cirugía	Tiempo de cirugía
Anestesista: Dr. Berenguer Pellus, Joaquín Vicente nº de colegiado 0305219	Septorrinoplastia	Decúbito supino y semi fowler	7 horas
Anestesista: Dr. Hernando Sáez, Jorge (nº de colegiado: 0309217)	Cirugía artroscópica de hombro	Decúbito lateral	3 horas
Anestesista: Dra. Latorre Del Valle, Ester nº de colegiado: 0310578	Liftin facial y cuello	Decúbito supino más rotación interna y externa de cabeza y cuello	12 Horas
Anestesista: Huerta Palau, José Miguel (nº de colegiado: 0305899)	Histerectomía laparoscópica	Decúbito supino-Trendelenburg y antitrendelenburg	2 horas
Anestesista: Dr. Gilabert Morell, Antonio (nº de colegiado: 0308436)	Cirugía de hombro abierta	Decúbito supino y Fowler	1 hora y 30 minutos
Anestesista: Dr. Mario Alberto Jiménez Palacio (nº de colegiado: 031304492)	Cirugía cardiaca	Decúbito supino y Trendelenburg	5 horas
Anestesista: Dr. Gonzalo Cutillas Hernández (nº de colegiado: 030307094)	Colecistectomía laparoscópica	Decúbito supino y antitrendelenburg	1 hora
Anestesista: Dr. Manuel Gutiérrez (nº de colegiado: 030309922)	Artrodesis lumbar	Decúbito supino y decúbito prono	5 horas